



MDC – Mehr Fahrsicherheit.

Mit dem innovativen Fahrkomfortsystem MDC (Motion Direct Control) kann mit nur einer Bedieneinheit (Daumengashebel oder dem patentierten Mono-Command) das Triride beschleunigt und abgebremst werden. MDC sorgt für noch größere Fahrsicherheit und ermöglicht auch Nutzern mit größerer Funktionseinschränkung ein Rollstuhlzuggerät zu fahren.



Gas- und Bremshebel in einem

Mit nur einer Bedieneinheit können Sie das Triride beschleunigen und abbremesen.



Anhalten am Berg

Der Bergbrems- und Berganfahrassistent sorgt für ein sicheres Anhalten und Anfahren am Berg.



Bergabfahrt

Das MDC bremst bergab über die Motorbremse, um mit mehr Sicherheit kontrolliert bergab zu fahren. Zusätzlich lädt der Akku über die Rekuperation beim Bremsen für die Verlängerung der Reichweite.

Aktivieren & Deaktivieren leichtgemacht

Das Fahrkomfortsystem MDC kann jederzeit vom Nutzer mit nur einem Schalter aktiviert oder deaktiviert werden und bietet daher maximale Sicherheit und maximale Kontrolle über das Zuggerät in allen Situationen, in denen es benötigt wird.



MDC AKTIVIEREN & DEAKTIVIEREN

▲ ABBREMSEN
▼ BESCHLEUNIGEN

Welchen Unterschied gibt es beim Anhalten des Triride mit und ohne MDC?

Bei **aktiviertem MDC** ist die elektronische Bremse (Motorbremse) sofort aktiv, wenn der Gashebel nicht betätigt / losgelassen wird.
Der Bremshebel muss zum Anhalten des Triride nicht gedrückt werden.

Wenn das **MDC deaktiviert** ist, wird über den Bremshebel oder den Bremstaster des IBS gebremst.
Das Loslassen des Gashebels alleine hat keine Bremswirkung.